

Návod na použitie antigénových samotestov na domáce použitie značky Siemens Healthineers

Obsah balenia:

- 1 návod výrobcu na použitie pri samotestovaní
- 1 stručná referenčná príručka
- 5 kusov sterilných tampónov (sterilných tyčiniek)
- 5 testovacích jednotiek
- 5 extrakčných skúmaviek s pufrom a špičkami

Návod na používanie antigénových samotestov od značky Siemens Healthineers:

- Krok 1:** Vloženie skúmavky do pracovnej stanice Vložte skúmavku do pracovnej stanice dodanej so súpravou. Pri súpravách obsahujúcich vopred naplnené odberové skúmavky: Z vrchnej časti skúmavky zložte fóliu. Pri súpravách s fľaštičkami s tlmivým roztokom: Do skúmavky pridajte 10 kvapiek tlmivého roztoku.
- Krok 2:** Odber vzorky z nosa Použite dodávanú sterilnú výterovú tyčinku a opatrne si ju vložte do jednej nosnej dierky. Špičku tyčinky zasuňte 2–4cm, kým nepocítite odpor. 5-krát otočte tyčinku v nosnej dierke. Touto istou tyčinkou zopakujte proces v druhej nosnej dierke, pričom ju znova 5-krát otočte. Vyberte tyčinku z nosnej dutiny a postupujte podľa pokynov na spracovanie vzorky.
- Krok 3:** Otáčajte tyčinkou Otočte tyčinku aspoň 6-krát vnútri skúmavky, pričom ju pritlačte o dno aj bočné steny skúmavky.
- Krok 4:** Nechajte postáť a vložte špičku kvapkadla Nechajte postáť jednu minútu a ešte niekoľkokrát pritlačte. Potom tyčinku bezpečne vyberte a zlikvidujte a špičku kvapkadla vložte do skúmavky so vzorkou.
- Krok 5:** Pridajte vzorku na kazetu Položte kazetu, označte ju a do nádržky pridajte 4 kvapky testovacej vzorky.
- Krok 6:** Interpretácia výsledkov Výsledky budú k dispozícii o 15 minút. Po 20 minútach výsledky už neinterpretujte.

Návod na použitie nájdete aj na webovej stránke výrobcu: <https://www.clinitest.siemens-healthineers.com/sk>